



***Schienali Posturali  
e accessori per carrozzine***

# Schienali in alluminio

Schienali posturali rigidi  
in alluminio



guscio interamente in alluminio di qualità aeronautica, pensato per soddisfare le diverse esigenze degli utenti.

Il particolare design ne fa uno degli schienali in alluminio più leggeri in commercio.

Gli speciali attacchi alla carrozzina riducono al massimo le tolleranze rendendo gli schienali ADI particolarmente stabili e performanti.

La serie in Alluminio è disponibile con profilo attivo, avvolgente ed extra avvolgente in ben 5 diverse altezze, 11 possibili larghezze e 3 differenti profili, permettendo quindi un'alta gamma di personalizzazioni.

Disponibili con due tipi di attacco alla carrozzina.

Imbottitura e fodera rimovibili.

Disponibili anche le spinte laterali - fisse o swing away - per un maggior supporto del tronco (solo per profilo attivo)

## CARATTERISTICHE

• Larghezza carrozzina	da 25 a 50 cm
• Peso	822 gr (schienale std, largh. 38 cm)
• Attacchi	2 punti regolabile 4 punti regolabile estraibile

## ALTEZZE SCHIENALI



Basso - 25 cm Medio - 33cm Standard - 40 cm Alto - 46 cm XAlto - 51 cm

## AVVOLGENZA PROFILI



Attivo - profondità 6 cm



Avvolgente - profondità 10 cm



Extra-avvolgente - profondità 15 cm

Schienali posturali rigidi ultraleggeri con guscio interamente in fibra di carbonio.

Permettono di soddisfare appieno le esigenze di utenti attivi, fornendo altissime prestazioni in termini di leggerezza e funzionalità.

Il design pulito ed essenziale si abbina a qualsiasi carrozzina.

Gli speciali attacchi alla carrozzina riducono al massimo le tolleranze, rendendo gli schienali ADI particolarmente stabili e performanti.

La serie in carbonio è disponibile con profilo attivo e avvolgente, in 3 diverse altezze, 8 possibili larghezze, permettendo quindi un'alta gamma di personalizzazioni.

Disponibili con tre tipi di attacco alla carrozzina.

Imbottitura e fodera rimovibili.



## CARATTERISTICHE

• Larghezza carrozzina	da 30 a 48 cm
• Peso	737 gr (schienale std, largh. 38 cm)
• Attacchi	2/4 punti fisso 2 punti regolabile 4 punti regolabile estraibile

## ALTEZZE SCHIENALI



Basso - 25 cm

Medio - 33cm

Standard - 40 cm

## AVVOLGENZA PROFILI




Attivo - profondità 6 cm



Avvolgente - profondità 10 cm

## REGOLAZIONI IN INCLINAZIONE

Gli attacchi regolabili ADI permettono 20° di regolazione dell'inclinazione, senza ridurre la profondità di seduta.

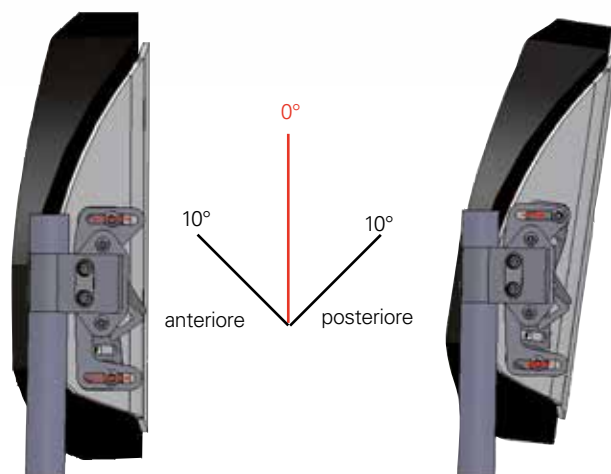


## REGOLAZIONI IN LARGHEZZA

I sistemi di montaggio a 2 punti ADI hanno una regolazione totale in larghezza di circa 2,5 cm (1").



Regolazione Larga

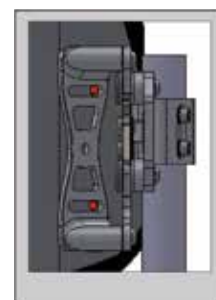

Regolazione Stretta

## REGOLAZIONE IN PROFONDITÀ

Gli attacchi ADI consentono molteplici regolazioni in profondità.



Schienale con attacchi montati anteriormente ai tubi dello schienale.

- A) Anteriorizzazione massima: Posizione del cuscino schienale anteriorizzata di 57 mm rispetto ai tubi dello schienale.
- B) Posteriorizzazione massima. Posizione del cuscino schienale 25 mm davanti ai tubi.



Schienale con attacchi montati in posizione tradizionale dietro i tubi dello schienale.

- A) Centrale: Cuscino schienale in linea con i tubi della carrozzina.
- B) Avanzato: Profondità minima cuscino schienale anteriorizzato.
- C) Profondità massima: Cuscini schienale in posizione arretrata rispetto alla carrozzina di 16,8 mm.

Nota: il range di regolazione è di 31,75 mm



## FISSAGGIO AI TUBI DELLA CARROZZINA

Gli attacchi possono essere montati sulla maggior parte delle carrozzine attraverso morsetti regolabili in grado di adattarsi ai tubi schienale di diversi diametri e forme senza bisogno di riduttori.



## DISPOSITIVI D'ATTACCO



### Attacco fisso

Dispositivo di attacco fisso, senza regolazioni. Disponibile solo per gli schienali serie carbonio. 4 punti di attacco per gli schienali medi e standard; 2 punti per gli schienali bassi.



### Attacco regolabile fisso

Dispositivo di attacco a 2 punti fisso, regolabile in inclinazione e profondità. Studiato per massimizzare le performance dell'utente. Lineare, leggero.



### Attacco regolabile estraibile

Dispositivo di attacco a 2 punti regolabile ed estraibile. L'Hardware "Quick Release" permette l'estrazione dello schienale con una sola mano.

SCHIENALI IN ALLUMINIO

Larghezza Carrozina cm	Profilo	Altezza schienale				
		Basso	Medio	Standard	Alto	XAlto
25	Attivo	√				
	Avvolgente	√				
28	Attivo	√				
	Avvolgente	√				
30	Attivo	√	√			
	Avvolgente	√	√			
33	Attivo	√	√			
	Avvolgente	√	√			
35	Attivo	√	√	√		
	Avvolgente	√	√	√		
38	Attivo	√	√	√		
	Avvolgente	√	√	√		
40	Attivo	√	√	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√	√	√
	Extra-Avvolgente			√	√	√
43	Attivo	√	√	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√	√	√
	Extra-Avvolgente			√	√	√
45	Attivo	√	√	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√	√	√
	Extra-Avvolgente			√	√	√
48	Attivo	√	√	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√	√	√
	Extra-Avvolgente			√	√	√
50	Attivo	√	√	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√	√	√
	Extra-Avvolgente			√	√	√

SCHIENALI IN CARBONIO

Larghezza Carrozina cm	Profilo	Altezza schienale		
		Basso	Medio	Standard
33	Attivo	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√
35	Attivo	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√
38	Attivo	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√
40	Attivo	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√
43	Attivo	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√
45	Attivo	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√
48	Attivo	√	√	√
	Avvolgente	√	√	√

## Spinte laterali per schienali in alluminio

Gli schienali ADI in alluminio possono essere accessoriati con spinte laterali in caso l'utente necessiti di un maggior supporto al tronco. Possono essere richieste sia fisse che swing away e sono disponibili in 3 grandezze:



**Small**  
(hxp) 7,5 cm x 7,5 cm



**Medium**  
(hxp) 7,5 cm x 10 cm



**Large**  
(hxp) 11,5 cm x 11,5 cm



**Swing Away**



**Fisse**



**Inserto SIPS**

Il supporto SIPS fornisce un supporto addizionale quando è necessario un maggiore sostegno lombare e controllo del tronco. Viene inserito all'interno della fodera e fissato in posizione con velcro.



**Maniglia**

Le maniglie per schienali Adi sono state progettate per persone con limitate funzionalità delle mani e che devono estrarre e riposizionare spesso lo schienale. La Maniglia può essere applicata su qualsiasi schienale ADI.



## Privacy Flap

Privacy Flap permette di chiudere lo spazio tra lo schienale ed il piano della seduta. Si aggancia semplicemente alla zip della fodera dello schienale ADI e viene fissato con il velcro al telino della seduta.



**Bodytech S.r.l.**

Tel. +39 0187 940142 - Fax +39 0187 934142

[info@bodytechitalia.it](mailto:info@bodytechitalia.it)

C.F. 91032440454 - P.I. 01216490456



w w w . b o d y t e c h i t a l i a . i t